

IVALON

Surgical Products
by **fabco**®

Taponamiento nasal anatómico Taponamiento nasal

CE 0459

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50701-00120 Rev. G

Taponamiento nasal / Taponamiento nasal anatómico

(Se utiliza tras la cirugía intranasal)

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1. ANTES DE LA INSERCIÓN

A. (Este paso es solo para Taponamiento nasal anatómico)

Los taponamientos nasales anatómicos poseen una forma anatómica que requiere una inserción adecuada. Antes de insertarlo, debe localizar el punto verde del taponamiento nasal. Primero inserte el extremo con el punto verde. El punto verde debe estar situado en el borde frontal y superior antes de la inserción.

B. Recubra los laterales y el borde frontal del taponamiento nasal con un lubricante médico para facilitar su inserción.



Paso 2. INSERCIÓN


Agarre el taponamiento nasal con unas pinzas e insértele con cuidado por el suelo nasal hasta quede totalmente insertado en la nariz.

Paso 3. TRAS LA INSERCIÓN

Si es necesario, hidrate el borde exterior del taponamiento con una jeringa que contenga 10 cc de solución salina o agua estéril.

PRECAUCIÓN

Sujételo con esparadrapo en la mejilla para evitar que se mueva.

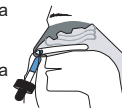

Paso 4. ANTES DE LA EXTRACCIÓN

Rehidrate el taponamiento con una jeringa que contenga 10 cc de solución salina o agua estéril. Adminístrela hasta que el taponamiento quede totalmente saturado. Deje el taponamiento insertado entre 5 y 10 minutos después de rehidratarlo para facilitar su extracción. Si se ha colocado una cánula respiratoria, primero extraígalas y después rehidrate.



Paso 5. EXTRACCIÓN

Utilice unas pinzas para agarrar el taponamiento y extraerlo con cuidado.

PRECAUCIÓN

- Estéril y de un solo uso. Su reutilización puede causar contaminación microbiana y por consiguiente, un deterioro del estado de salud del paciente. FABCO no se hará responsable de ningún producto que haya sido reesterilizado o reutilizado.
- Un taponamiento demasiado ajustado o demasiado prolongado puede causar necrosis.
- No corte las esponjas cerca de la zona del procedimiento quirúrgico. Podrían entrar fragmentos de esponja en la zona de la herida del paciente. Si no se extraen los fragmentos de esponja del paciente, se puede producir una reacción a cuerpos extraños.
- Aplique siempre rehidratación antes de su extracción. Si no se aplica rehidratación, el procedimiento de extracción del taponamiento resultará más molesto para el paciente.
- La extracción debe realizarla un médico.
- No deje el taponamiento insertado durante más de tres (3) días. Si el taponamiento se deja insertado demasiado tiempo, se puede producir necrosis o puede aumentar el riesgo de shock tóxico (véase a continuación).
- No lo utilice si el embalaje está abierto, dañado o caducado para prevenir el riesgo de contaminación y la pérdida de esterilidad. Emplee técnicas asépticas adecuadas en todas las fases del procedimiento.
- Los taponamientos usados deben considerarse residuos biológicos y deben desecharse de conformidad con las normativas locales.

Advertencia sobre los ftalatos

Los tubos de este dispositivo contienen ftalatos, en concreto ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP) y ftalato de bencilo y butilo (BBP). Los resultados de ciertos experimentos con animales han demostrado que los ftalatos son potencialmente tóxicos para la reproducción. Partiendo del estado actual de los conocimientos científicos, no pueden descartarse riesgos para los bebés prematuros de sexo masculino en caso de exposición o aplicación a largo plazo. Los medicamentos que contienen ftalatos solo se deben utilizar temporalmente en mujeres embarazadas, madres lactantes, bebés y niños.

Shock tóxico

En raras ocasiones, las condiciones físico-químicas asociadas a la cirugía nasal/sinusal, tanto con como sin taponamiento nasal, pueden presentar riesgo de experimentar un síndrome de shock tóxico (SST). Los signos de advertencia del SST incluyen: fiebre repentina (normalmente 38,8°C o más), vómitos, diarrea, mareos, desmayos (o sensación de desvanecimiento al levantarse) o una erupción cutánea con aspecto de quemadura solar. Si aparecen estos u otros síntomas relacionados con el SST, extraiga el taponamiento en seguida y acuda al médico de inmediato. El taponamiento nasosinusal IVALON® no posee propiedades antimicrobianas, no tiene ningún efecto bacteriostático en las infecciones preexistentes y no previene la aparición de nuevas infecciones. En el caso de las infecciones preexistentes, se recomienda administrar un tratamiento adecuado.

REF Número de pedido	LOT Número de lote	STERILE R Esterilizado mediante irradiación	 Prospecto con instrucciones de uso	 No reutilizar	 DEHP BBP	 Fecha de caducidad
--------------------------------	------------------------------	---	--	-------------------	-----------------	------------------------

IVALON® es una marca comercial registrada de Medsorb Dominicana S. A.

1391-50701-00120 Rev. G [ESP]