

IVALON

Surgical Products
by **fabco**®

Taponamiento ótico posoperatori

CE 0459



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50334-00122 Rev. F

Taponamiento ótico posoperatori

(Se utiliza tras la cirugía ótica)

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1. ANTES DE LA INSERCIÓN

Los taponamientos nasales anatómicos poseen una Recubra la punta posterior y los laterales del taponamiento ótico con una crema disuelta en agua o un lubricante para facilitar su inserción. El taponamiento ótico IVALON® se puede recortar con unas tijeras si es necesario.

Paso 2. INSERCIÓN

Agarre el taponamiento ótico con una pinzas. Introduzca con cuidado el taponamiento ótico en el conducto auditivo externo, o en la cavidad mastoidea, y deje la punta anterior sin recubrir para su posterior hidratación.



Paso 3. HIDRATACIÓN

Hidrate el taponamiento con una jeringa que contenga una solución salina estéril, agua estéril o una solución antibiótica.



Paso 4. ANTES DE LA EXTRACCIÓN

Es posible que se deba rehidratar parcialmente el taponamiento ótico antes de extraerlo.

Paso 5. EXTRACCIÓN

Utilice unas pinzas para agarrar el taponamiento y extraerlo con cuidado.



PRECAUCIÓN

- Estéril y de un solo uso. Su reutilización puede causar contaminación microbiana y, por consiguiente, un deterioro del estado de salud del paciente. FABCO no se hará responsable de ningún producto que haya sido reesterilizado o reutilizado.
- No deje que el exudado se endurezca, ya que podría interferir en el flujo del drenaje.
- No corte la esponja cerca de la zona del procedimiento quirúrgico. Podrían entrar fragmentos de esponja en la zona de la herida del paciente. Si no se extraen los fragmentos de esponja del paciente, se puede producir una reacción a cuerpos extraños.
- Este dispositivo debe utilizarlo un médico.
- No deje el taponamiento insertado durante más de diez (10) días. Si el tapón se deja insertado demasiado tiempo, se puede producir necrosis, crecimiento interno tisular y contaminación o puede aumentar el riesgo de shock tóxico (véase a continuación).
- No lo utilice si el embalaje está abierto, dañado o caducado para prevenir el riesgo de contaminación y la pérdida de esterilidad. Emplee técnicas asépticas adecuadas en todas las fases del procedimiento.
- Los taponamientos usados deben considerarse residuos biológicos y deben desecharse de conformidad con las normativas locales.

Shock tóxico

En raras ocasiones, las condiciones físico-químicas asociadas a la cirugía ótica, tanto con taponamientos del oído como sin ellos, pueden presentar riesgo de experimentar un síndrome de shock tóxico (SST). Los signos de advertencia del SST incluyen: fiebre repentina (normalmente 38,8° o más), vómitos, diarrea, mareos, desmayos (o sensación de desvanecimiento al levantarse) o una erupción cutánea con aspecto de quemadura solar. Si aparecen estos u otros síntomas relacionados con el SST, extraiga el taponamiento enseguida y acuda al médico de inmediato. Los taponamientos del oído IVALON® no poseen propiedades antimicrobianas, no tienen ningún efecto bacteriostático en las infecciones preexistentes y no previenen la aparición de nuevas infecciones. En el caso de las infecciones preexistentes, se recomienda administrar un tratamiento adecuado.

REF

Número
de pedido

LOT

Número
de lote

STERILE R

Esterilizado
mediante
irradiación



Prospecto con
instrucciones
de uso



No
reutilizar



Fecha de
caducidad

IVALON® es una marca comercial registrada de Medsorb Dominicana S. A.

1391-50334-00122 Rev. F [ESP]