

# IVALON

Surgical Products  
by fabco®

## Göz Dreni



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

**fabco®**

Manufactured for:  
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA  
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50117-00105 Rev. D

## Göz Dreni

(Oftalmik cerrahi bölgesindeki sıvıları almak ve toplamak için kullanılır)

### KULLANMA KILAVUZU

#### Adım 1. HAZIRLIK

Yüz bölgesini iyice temizleyip, kurutun.


#### Adım 2. TOPLAMA TORBASI UYGULAMASI

Toplama torbası üzerindeki kendinden yapışkanlı bandı çıkarın.  
(Not: Toplama torbası içindeki fitili yerinde bırakın.)

Torbayı göz kapağı aralığından 1/4 inç mesafede yüzün yan tarafına sımsıkı yapıştırın. Toplama torbası, yüzün yan tarafı boyunca alna dik şekilde sarkmalıdır. Örtü kullanılıyorsa, torbayı örtüye illeştirin.

#### Adım 3. FİTİLİ YERLEŞTİRİN

İstenilen uzunluğu ortaya çıkarmak için fitili nazikçe toplama torbasından çekin. Fitili yumuşayınca kadar steril suyla ıslatın. Fitilin retraktörler nedeniyle sıkışmadığından veya engellenmediğinden emin olarak istenilen yere yerleştirin. İşleme başlayın; normal şekilde antiseptik suyla yıkayın.

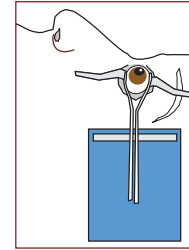

#### DİKKAT

- Önce fitili ıslatın. Kuru fitil konjonktivayı tahriş edebilir.
- Steril. Bu ürün Sadece Tek Kullanımlıktır; yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım mikrobiyal kontaminasyona neden olarak hastanın sağlığının bozulmasına yol açabilir. Yeniden sterilize edilen veya yeniden kullanılan üründen FABCO sorumlu olmayacaktır.
- Orijinal ambalajı hasarlı veya açılmış ürünleri kullanmayın. Orijinal ambalajı açılmamış, zarar görmemiş veya son kullanım tarihi geçmiş ürünler sterildir. Tüm kullanım aşamalarında ilgili aseptik teknikleri kullanın.
- Ameliyat yerinin yakınındaki süngerleri kesmeyin; x ışını algılama özellikleri olmayan parçacıklar hastanın yara bölgesine girebilir. Sünger parçacıklarının hastadan çıkarılmaması yabancı cisim reaksiyonuna yol açabilir.

<b>REF</b> Yeniden Sipariş Numarası	<b>LOT</b> Lot Numarası	<b>STERILE R</b> İşinlamayla Sterilize Edilmiştir	<b>!</b> İşinlamayla Sterilize Edilmiştir	<b>⊗</b> Yeniden Kullanmayın	<b>⌚</b> Son Kullanım Tarihi
--	----------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

IVALON® Medsorb Dominicana S.A.'nın tescilli ticari markasıdır.

1391-50117-00105 Rev. D [TRK]