

# IVALON

Surgical Products  
by **fabco**<sup>®</sup>

## Lancia chirurgica

**fabco**<sup>®</sup>

Manufactured for:  
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA  
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

 Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON<sup>®</sup> is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

1391-50116-00101 Rev. D

## Lancia chirurgica

(per l'uso nell'assorbimento e nella rimozione di fluidi durante interventi oftalmici e altre procedure di microchirurgia)

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### ATTENZIONE

- Sterile. Questo prodotto è esclusivamente monouso; non sterilizzare. Il riutilizzo può causare contaminazione microbica e deteriorare di conseguenza la salute del paziente. FABCO declina ogni responsabilità per prodotti sottoposti a sterilizzazione o riutilizzati
- Non utilizzare se una singola confezione è aperta o appare danneggiata. Il prodotto è garantito sterile fintantoché la singola confezione rimane sigillata o non risulta manomessa o scaduta. Adottare tecniche asettiche appropriate in ogni fase della manipolazione.
- Non tagliare le spugne nelle vicinanze del sito operatorio, poiché piccoli frammenti non rilevabili ai raggi X potrebbero introdursi nella lesione del paziente. La mancata rimozione dei frammenti di spugna dal paziente può causare reazioni avverse per la presenza di corpi estranei.

<b>REF</b> Numero di riordino	<b>LOT</b> Numero di lotto	<b>STERILE R</b> Sterilizzato per radiazione	 Utilizzare l'insero	 Non riutilizzare	 Data di scadenza
----------------------------------	-------------------------------	---	--	---	---

IVALON<sup>®</sup> è un marchio registrato di Medsorb Dominicana S.A.

1391-50116-00101 Rev. D [ITA]